

cleanoz[®] グリーンノーズ

対象年齢：0歳～

MB002




- すぐに使える
- 効果的
- 衛生的
- 使い方簡単
- 優しい使い心地
- 安全



ユーザーマニュアル

部品の説明

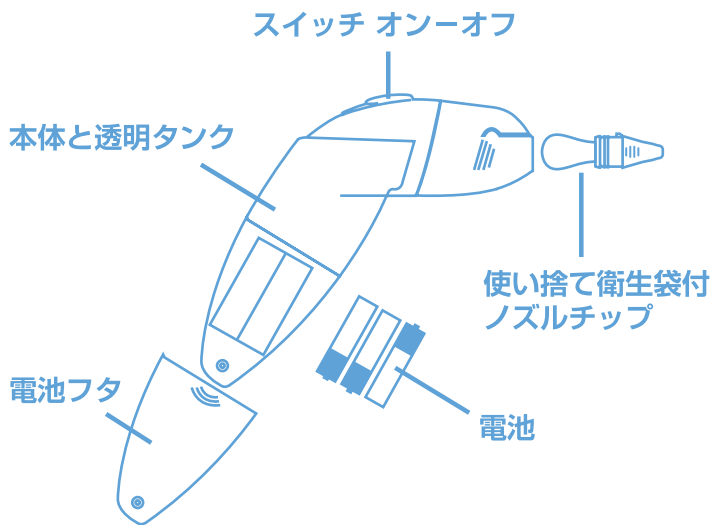

安全のための重要事項



お使いになる前に全ての説明をお読み下さい。

クリーンノーズは効果的かつ安全にご利用いただけるように注意深く設計されています。しかし、赤ちゃんのケアのための電気製品の使用に際しては、常に基本的な安全のための注意を払う必要があります。

本製品は玩具ではありません。取り扱いが大人が行なってください。


警告

本製品はこの説明書に記載された用途のみに使用してください。
指定された種類以外の電池を使用すると破裂する危険があります。
単3アルカリ乾電池のみをご使用ください。

医療面での警告

注意：使い捨て衛生袋付ノズルピースにはアレルギー症状を引き起こす可能性のあるラテックス製の袋が使われています。

- 1) クリーンノーズの使用前、使用後に手を洗ってください。
- 2) ノズルを赤ちゃんの鼻腔に深く差し入れないで下さい。
クリーンノーズを決められた向きで使用してください。

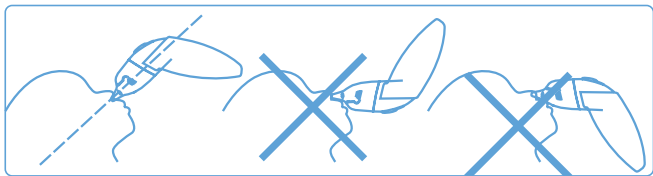


- 3) 赤ちゃんの安全のために、吸引は数秒間に限定してください。
- 4) 鼻の炎症や出血を起こす場合はクリーンノーズを使用しないでください。
- 5) 感染症や、発熱、鼻の炎症、出血があった場合、医師の診断を受けてください。
- 6) 使い捨てノズルピースを取り付けずにクリーンノーズを使用したり、劣化した袋を取り付けしないでください。
- 7) クリーンノーズには使い捨てノズルピースのみをご使用ください。
- 8) ご使用になる毎に使い捨てノズルピースを交換してください。

この説明書は保管してください。

ご使用方法

クリーンノーズは赤ちゃんの鼻の電気クリーナーです。

- 1) 最初に使うときは：本体のカバーを取り外し、電池ケースを開きます（ねじ回しでねじをゆるめます）。単3アルカリ乾電池を挿入し、電池ケースを閉めます。アルカリ乾電池のみを使用し、電池の極性を間違わないように挿入してください。

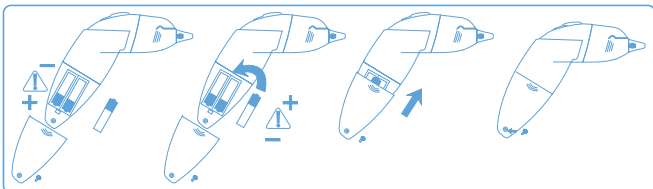


<<電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。


下記に注意してください。>>

- 電池の装着や交換は保護者の方が行なってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を
まぜて使わないでください。
- ＋－（プラス/マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に
入れたりしないでください。
- 万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、
医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- お子様が電池を飲み込まないように注意してください。
電池はお子様の手の届かない所に保管してください。
また、電池を誤飲してしまった場合は、速やかに医師にご相談ください。

- 2) 新しいノズルピースを挿し込む際は、上部にあるシリコン製のガイド用の節と本体の透明タンクの端を合わせるように入れてください。挿し込む際、袋を破らないように注意してください。

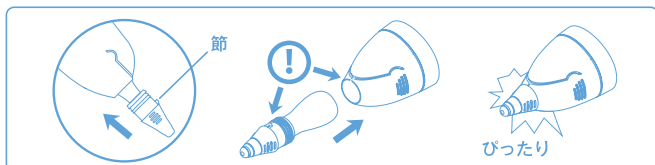


- 3) 使い捨てノズルを鼻腔の開口部に位置させてください。クリーンノーズを効果的に使うには、分泌物の吸引を行う前に生理食塩水で鼻腔の中を洗浄することをお勧めします。鼻のクリーニングをより効率的にするには、一方の鼻腔でクリーンノーズを使用する間、もう一方の鼻腔を人差し指で塞ぐことをお勧めします。

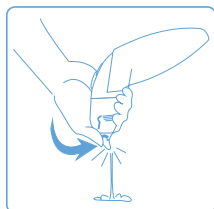

- 4) スイッチをオンにする：スイッチを押さず（分泌物は衛生袋に集められます）。
- 5) スイッチをオフにする：吸引は、袋が一杯になると数秒後に自動的に停止します。
- 6) もう一方の鼻腔をクリーニングする前に、（赤ちゃんから離し）親指でノズルチップを押して、衛生袋を空にします。

- 7) 使用後、使い捨てノズルチップを押して空にし、取り外して、廃棄してください。

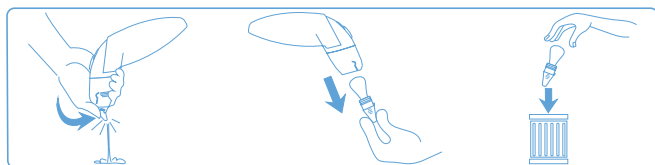

使用後のクリーニング



- 1) ノズルピースは1回だけ使用できます。使用後は廃棄してください。
やむを得ず再利用しなければならない場合は、使用後すぐに衛生袋付ノズルをきれいな水ですすぎ（クリーンノーズできれいな水を3秒間吸引し、それから衛生袋を空にします）、消毒した布で角型の先端を洗浄してください。
ただし、**同じノズルチップを、夜をまたいで絶対に再使用しないでください。**
同じ衛生袋付ノズルピースを別の赤ちゃんには絶対に使用しないでください。
- 2) 本体のクリーニング：本体をクリーニングする前に電池ケースが閉じられていることを確認してください。溶解性や研磨性のあるものでクリーンノーズをクリーニングしないでください。
- 3) 本体を液体に浸けないでください。クリーンノーズで水以外のものを吸引しないでください。
- 4) 環境保護のためリサイクルできるものは認可されたリサイクル場所でありサイクルすることをお勧めします。電池は通常の家庭ごみとして廃棄しないでください。



保管

- 1) クリーンノーズは乾燥した場所に室温で保管してください。
クリーンノーズと使い捨て衛生袋付ノズルピースは適切な状態、5℃から45℃の温度で、保管してください。
- 2) 数ヶ月使用しない場合は、電池を取り外してください。

注意



- 1) クリーンノーズは玩具ではありません。クリーンノーズは保護者が、説明書をよく読んでから使用してください。
- 2) クリーンノーズとノズルピースはお子様の手の届かないところに保管してください。
- 3) クリーンノーズは、赤ちゃんの鼻の吸引のため、家庭用に設計されています。
- 4) クリーンノーズは断続的に使用するよう設計されています（15秒／最大で1分間）。
ノズルピースを装着せず使用したり、衛生袋が一杯のままスイッチをオンにしておくと、電池が早く消耗してしまいます。
- 5) クリーンノーズをご使用前に、全ての部品が正しく取り付けられているかを確認してください。
- 6) 使い捨て衛生袋付ノズルピースの使用有効期限に注意してください。
- 7) 本体やノズルピースを分解しないでください。

- 8) 本体をぶつかけたり、曲げたり、落としたりしないようにしてください。
- 9) クリーンノーズには、専用のノズルピースを使用してください。専用のノズルピース以外は使用しないでください。
- 10) 衛生袋付ノズルピースは無菌ではありません。
- 11) 本体やノズルピースを次のような状況では使用しないでください：
- * 炎天下に駐車した自動車の中など高温の場所
 - * 直射日光の下
 - * 高温、物が腐り易いような場所
- 12) 本品を上述した状態以外では使用しないでください。

トラブルシューティング

クリーンノーズが動かない

電池の極性をチェックしてください。

問題が解決しない

新しい電池と交換してください。

袋が破れて吸引物がクリーンノーズの真空ポンプ内部に入ってしまった

破れた使い捨てノーズピースを取り外し、クリーンノーズできれいな水を5秒間吸引し、さらに5秒間空気を吸引しポンプを乾燥させます。透明タンクを柔らかい布で拭きます。これでクリーンノーズに新しい使い捨てノズルピースを使うことができます。

このようなトラブルを防ぐため、ノズルピースに取り付ける際は、衛生袋を破かないように注意してください。

Protected by US and International Patents Pending. Design Patent Pending.
Design U.S. Des. Pat. 542 915.

UBIMED® and CLEANOZ® are registered trademarks of Ubimed®.

製造元：UBIMED® Inc.

輸入元：日本トイザラス株式会社