


# Mouche bébé Petit Nez



*Petit*  
Terrailon® 

[www.petit-terraillon.com](http://www.petit-terraillon.com)

## “PETIT NEZ” BABYNEUSREINIGER

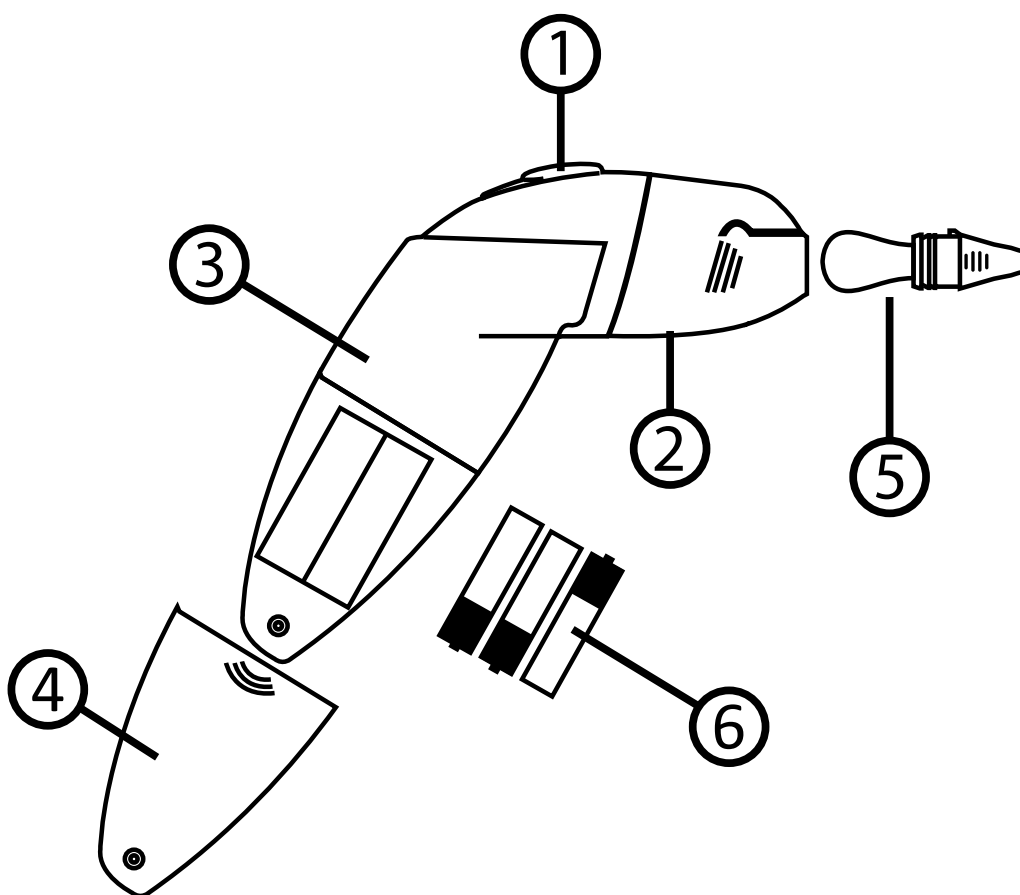

### ALGEMENE BESCHRIJVING

- ① Aan/uit-knop
- ② Luchtaanvoeropening van het doorzichtige reservoir
- ③ Body van het apparaat en doorzichtig reservoir
- ④ Batterijenvak
- ⑤ Wegwerpbaar opzetstuk van het reservoir
- ⑥ Batterijen

## BELANGRIJKE VOORZORGEN VOOR DE VEILIGHEID

### DE HANDLEIDING VOLLEDIG LEZEN VOOR GEBRUIK



De *Petit Nez* babyneusreiniger van Petit Terraillon werd zorgvuldig ontworpen voor een efficiënt en veilig gebruik. Er moeten altijd enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen genomen worden bij het gebruik van een elektrisch apparaat, vooral wanneer dit dient om zuigelingen te verzorgen.

### OPGELET


Gebruik dit toestel uitsluitend voor het in deze handleiding beschreven gebruik. Gebruik alleen wegwerpelementen die door Petit Terraillon worden aanbevolen.

**EXPLOSIEGEVAAR INDIEN DE BATTERIJEN DOOR EEN VERKEERD TYPE VERVANGEN WORDEN. VERVANG DE BATTERIJEN UITSLUITEND DOOR AAA LR03 ALKALINEBATTERIJEN.**

### MEDISCHE WAARSCHUWINGEN

**OPGELET: HET WEGWERPBARE OPZETSTUK VAN HET RESERVOIR BEVAT EEN ZAK UIT LATEX DIE ALLERGISCHE REACTIES KAN VEROORZAKEN.**

- 1) De handen wassen voor en na het gebruik van de *Petit Nez* babyneusreiniger.
- 2) Het neusopzetstuk niet diep in het neusgat van de zuigeling brengen. De babyneusreiniger in de aanbevolen richting gebruiken.

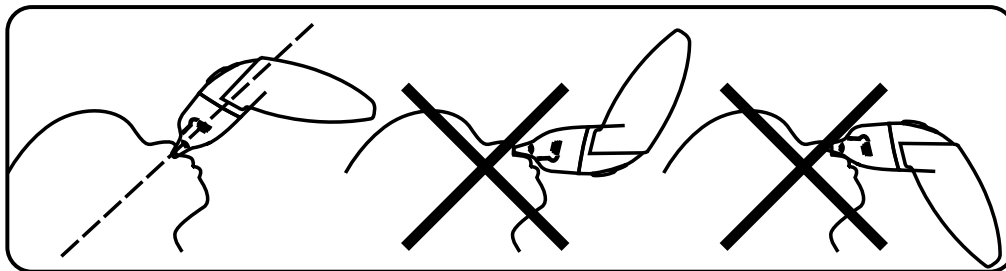


- 3) Voor de veiligheid van de baby is de aanzuigtijd beperkt tot enkele seconden.
- 4) De *Petit Nez* babyneusreiniger niet gebruiken bij neusirritatie of -bloeding.
- 5) Bij infectie, koorts, neusirritatie of -bloeding, uw arts raadplegen.
- 6) De *Petit Nez* babyneusreiniger niet zonder het neusopzetstuk van het reservoir of met een beschadigde zak gebruiken.
- 7) De *Petit Nez* babyneusreiniger enkel gebruiken met de neusopzetstukken voor reservoirs van Petit Terraillon.
- 8) Het wegwerpbaar neusopzetstuk van het reservoir na elk gebruik of minstens elke dag vervangen.

**BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG**


## GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE *PETIT NEZ* BABYNEUSREINIGER

De *Petit Nez* babyneusreiniger is een elektrisch aanzuigtoestel van neusslijm voor zuigelingen.



- 1) Bij de ingebruikneming: het batterijvak openen door de bevestigingsschroeven los te draaien (gebruik een aangepaste schroevendraaier), en het batterijvak uithalen. 3 AAA LR3 ALKALINE-batterijen invoegen en het batterijvak opnieuw sluiten. Uitsluitend alkalinebatterijen gebruiken en op de polariteit letten.

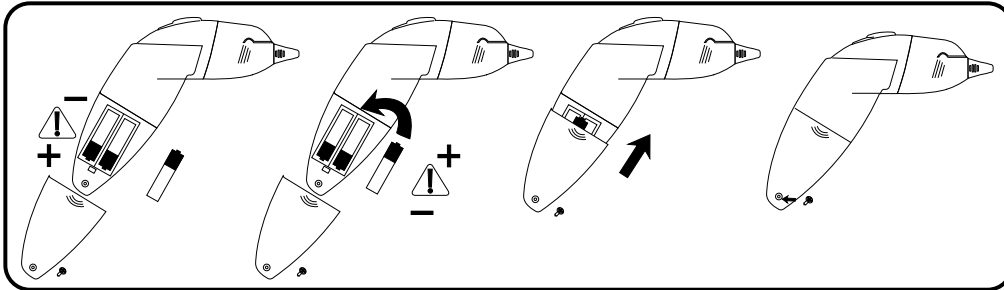


- 2) Om een nieuw neusopzetstuk aan te brengen: het bovenste uitstekende merkteken van het wegwerpopzetstuk in lijn brengen met de inkeping aan de achterkant van het doorzichtige reservoir. (Oppassen dat de reservoirzak niet vastgeklemd wordt).

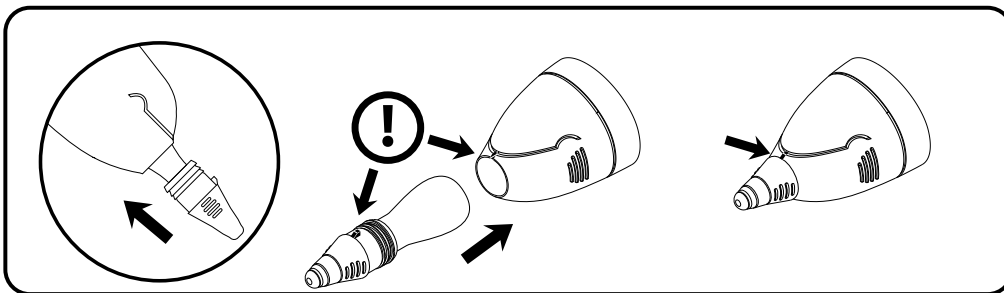

- 3) Het uiteinde van het neusopzetstuk aan het begin van de neusopening brengen. Om de efficiëntie van de *Petit Nez* babyneusreiniger te verhogen, kan de neus eerst met enkele druppels zoutoplossing gespoeld worden.

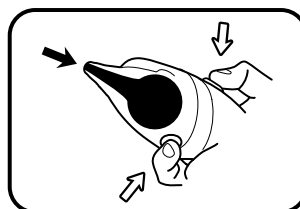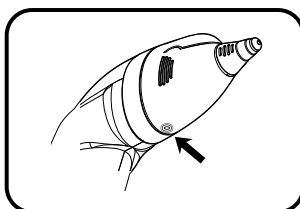


- 4) Inschakeling: de schakelaar indrukken waarbij u met een vinger de luchtaanvoeropening van het doorzichtige reservoir bedekt. Het slijm wordt in het reservoir van het wegwerpbaar neusopzetstuk verzameld.
- 5) Uitschakeling: de aanzuiging schakelt na enkele seconden automatisch uit wanneer het reservoir gevuld wordt.

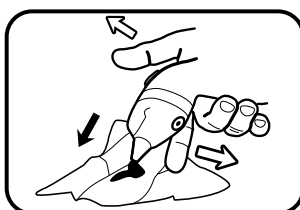

- 6) Het wegwerpreservoir boven een zakdoek legen door de luchtaanvoeropening van het doorzichtige reservoir niet meer te bedekken. Zuig pas daarna het slijm van het andere neusgat op.

7) Legen, daarna demonteren en het wegwerpneusopzetstuk na gebruik wegwerpen.

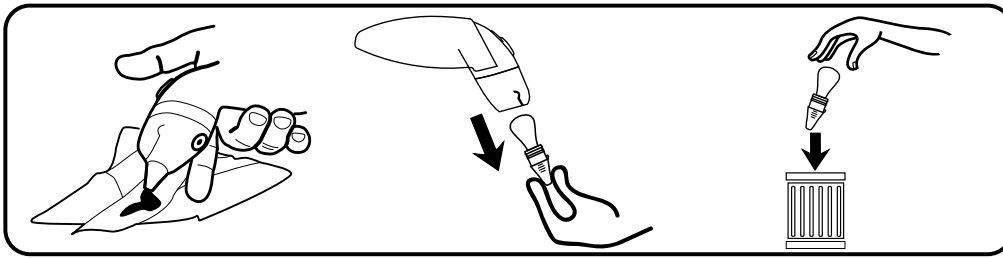

## SCHOONMAAK & ONDERHOUD

- 1) De neusopzetstukken van het reservoir mogen weggeworpen worden. Werp deze na gebruik of minstens elke dag weg.  
Om het wegwerpopzetstuk van het reservoir opnieuw te gebruiken, dient u het onmiddellijk na gebruik te spoelen door er gedurende 3 seconden zuiver water mee op te zuigen, daarna leegt u het reservoir en reinigt u het neusopzetstuk met een ontstekingswerend vochtig doekje.  
**Nooit hetzelfde wegwerpopzetstuk gebruiken bij verschillende baby's.**  
**Nooit hetzelfde wegwerpopzetstuk opnieuw gebruiken na de nacht.**
- 2) Reiniging van de body van de *Petit Nez* babyneusreiniger: controleren dat het batterijenvak goed gesloten is voor de reiniging. De *Petit Nez* babyneusreiniger niet met oplosmiddelen of schuurproducten reinigen.
- 3) De *Petit Nez* babyneusreiniger niet onderdompelen. Nooit andere producten dan water met de *Petit Nez* babyneusreiniger opzuigen (met opgezet opzetstuk van reservoir).

## OPSLAG

- 1) De *Petit Nez* babyneusreiniger op een droge plek op kamertemperatuur bewaren. De *Petit Nez* babyneusreiniger en zijn wegwerpopzetstukken moeten in geschikte omstandigheden opgeslagen worden: Temperatuur tussen 5 en 45 °C (41 en 113 °F).
- 2) Indien u de *Petit Nez* babyneusreiniger gedurende verschillende maanden niet gebruikt, is het aanbevolen om de batterijen te verwijderen.

## BELANGRIJKE VOORZORGEN

- 1) De *Petit Nez* babyneusreiniger is geen speelgoed! Hij moet gebruikt worden door een volwassene die de gebruiksaanwijzing gelezen heeft.
- 2) Houd de *Petit Nez* babyneusreiniger en zijn wegwerpopzetstukken buiten het bereik van kinderen.
- 3) De *Petit Nez* babyneusreiniger werd ontworpen voor thuisgebruik en enkel om het neusslijm van kinderen op te zuigen.
- 4) De *Petit Nez* babyneusreiniger werd ontworpen voor een periodiek gebruik (max. 15 s/min). Het gebruik van de *Petit Nez* babyneusreiniger in lege toestand zonder neusopzetstuk of het gebruik ervan wanneer het reservoir vol is, kan ertoe leiden dat de batterijen voortijdig leeg zijn.
- 5) Controleer of alle elementen correct gemonteerd zijn vooraleer u de *Petit Nez* babyneusreiniger gebruikt.



6) Leef de vervaldatum van de wegwerpneusopzetstukken na.

7) Probeer niet de body van de *Petit Nez* babyneusreiniger of de wegwerpopzetstukken te demonteren.

8) Laat de *Petit Nez* babyneusreiniger niet vallen, plooi hem niet of stoot er niet tegen.

9) Gebruik enkel de wegwerpopzetstukken van Petit Terraillon voor de *Petit Nez* babyneusreiniger. Ze werden ontworpen om enkel met de *Petit Nez* babyneusreiniger gebruikt te worden.

10) De wegwerpneusopzetstukken zijn niet steriel.

11) Gebruik de *Petit Nez* babyneusreiniger of zijn wegwerpneusopzetstukken niet in de volgende omstandigheden:

- \* op warme plekken zoals de binnenkant van een geparkeerde auto bij warm weer;
- \* onder rechtstreekse zonnestralen;
- \* in een vochtige of corrosieve atmosfeer;
- \* in de nabijheid van warme oppervlakken, explosieve of brandbare gassen.

12) De *Petit Nez* babyneusreiniger mag enkel gebruikt worden in de normale omstandigheden die in deze handleiding beschreven staan.

PROBLEEM	OPLOSSING
De <i>Petit Nez</i> babyneusreiniger werkt niet:	Controleer de juiste polariteit van de batterijen. Als het probleem aanhoudt: haal de batterijen eruit en steek er nieuwe batterijen in.
De <i>Petit Nez</i> babyneusreiniger zuigt niets op, het wegwerpreservoir wordt niet opgeblazen:	Hebt u tijdens het opzuigen de luchtaanvoeropening afgedekt?
Als een beschadigde zak slijm van de <i>Petit Nez</i> neusreinigerpomp bevat:	Het kapotte wegwerpneusopzetstuk wegnemen en met de <i>Petit Nez</i> neusreiniger gedurende 5 seconden zuiver water opzuigen, daarna gedurende 5 seconden lucht opzuigen om de pomp te drogen. Het doorzichtige reservoir met een zachte doek drogen. Uw babyneusreiniger kan opnieuw normaal werken met een nieuw wegwerpneusopzetstuk. Om dit probleem te voorkomen, moet u er op letten dat het soepele reservoir bij het plaatsen van het wegwerpopzetstuk niet doorboord wordt.

## ZORG VOOR HET MILIEU



Lever lege batterijen bij een speciaal inzamelpunt in zodat ze ingezameld en gerecycleerd kunnen worden. Gebruik geen verschillende soorten batterijen bij elkaar. Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen.

**Lever dit product aan het einde van zijn levenscyclus in bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zodat het gerecycleerd kan worden.**

## GARANTIE

Voor dit product geldt een garantie van 2 jaar voor materiaal- en productiefouten. Tijdens deze garantieperiode worden dergelijke gebreken gratis gerepareerd (als u een beroep doet op de garantie, dient u het aankoopbewijs voor te leggen). Schade door ongevallen, verkeerd gebruik of nalatigheid valt niet onder de garantie. Neem bij klachten eerst contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.

**Verdeeld door:** Terraillon SAS & Headquarters - 1 rue Ernest Gouin - 78290 Croissy sur Seine  
Consumentendienst: +33(0) 826 88 1789 - [serviceconsommateurs@terraillon.fr](mailto:serviceconsommateurs@terraillon.fr)

**Europese vertegenwoordiger:** IMHOTEP création SAS  
ZI Montplaisir - Rue du champ de courses – 38780 Pont-Evêque – Frankrijk

**Producent:** Ubimed®, 8666 Hayden Place, Culver City, California, USA

FCC part 15 compliant, IP 40

